

## Tilkoblingsveiledning (for Android™ PI285539 versjon 3.0)

Denne veiledningen viser deg hvordan du kobler Cochlear™ Kanso<sup>®</sup> 2 -lydprosessor(er) med Nucleus Smart-appen på en kompatibel Android-smarttelefon\*, slik at du kan bruke appen til å styre og overvåke lydprosessor(er).

\*Hvis du vil ha kompatibilitetsinformasjon, kan du besøke [www.cochlear.com/compatibility](http://www.cochlear.com/compatibility).

**MERK**  
For å bruke Android-versjonen av appen må lydprosessoren din ha den nyeste fastvaren installert. Ta kontakt med klinikkpersonalet.

### Koble til prosessoren(e).

**MERKNADER**

- Hvis du har lydprosessor(er) som allerede er tilkoblet, må du koble dem fra først. Se side 2 for instruksjoner om frakobling.
- Radiointerferens: Når du prøver å koble sammen en lydprosessor med en app, kan det være at du opplever interferens fra enkelte enheter (f.eks. mikrobølgeovner, trådløse rutere og TV Streamer-enheter). Hvis dette skjer, beveger du deg bort fra apparatet, før du prøver igjen.

- 1 Slå på Bluetooth på Android-smarttelefonen din.
- 2 Kjør Nucleus Smart-appen.
- 3 Sveip gjennom velkomstskjermene.
- 4 Opprett din Cochlear-konto (eller logg inn hvis du har en konto allerede).
- 5 Ha din(e) prosessor(er) klar(e) og trykk **Start oppsett**.
- 6 Slå lydprosessor(e) **AV**, og deretter **PÅ**.  
Hvis du har to prosessorer, gjør du dette på begge to etter hverandre. Enheten din søker etter din(e) lydprosessor(er) ...


**MERK**  
Hvis du bruker en **lydprosessor** og et **kompatibelt høreapparat**, kan du også koble dem sammen på denne måten.



- 7 Trykk på **Fortsett**.



- 8 Når prosessoren(e) din(e) vises, trykker du én gang for å starte sammenkoblingen.

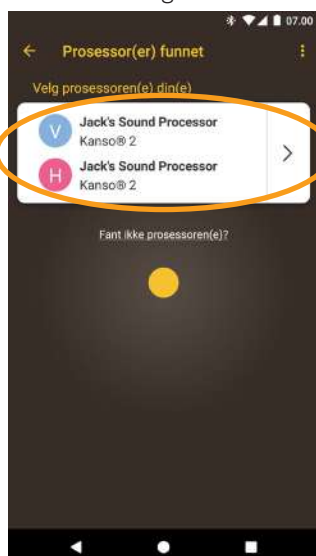

- 9 Denne skjermen vises når sammenkoblingen er fullført. Trykk på **Verifiser prosessorer**.



FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ...

- 10 Følg instruksjonene på skjermen for å **Bekreft** lydprosessor(e) din(e). Skjermbildet **Klargjøre prosessor(e)** vises i opp til 30 sekunder.

- 11 Trykk på et alternativ på skjermbildet **Lydprosessor(er)**. Hvis du blir bedt om det, angir du brukerinformasjon.

- 12 Når oppsettet er ferdig, vises dette skjermbildet. Trykk på **Start**.



#### MERK

For å koble sammen ytterligere kompatible enheter må du først deaktivere Bluetooth på enhetene som allerede er koblet.

Nå kan du bruke **Nucleus Smart-appen**! Se *brukerveiledningen for Nucleus Smart-appen* for mer informasjon.

## Smarttelefoner med lydoverføring for høreapparater

Hvis smarttelefonen din støtter lydoverføring til høreapparater, kan du motta lyd fra telefonen din rett til prosessoren din. Gjør som følger for å sette opp lydoverføring:

- 1 Når skjermbildet **Lydoverføring** vises, trykker du på **Aktiver**. Lydprosessor(e) din(e) vil slås av for et øyeblikk.



- 2 Hvis en annen / andre lydprosessor(er) allerede er koblet sammen eller overfører lyd til smarttelefonen din, må du **glemme** dem nå.

Følg instruksjonene på skjermen for å **glemme** prosessor(e), og deretter trykker du på **tilbake-knappen** for å gå tilbake til Nucleus Smart-app.

- 3 Vent mens skjermbildet **Kobler til prosessor** vises.



FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ...

- 4 Hvis **systemlyder** er aktivert på smarttelefonen, vil skjermbildet **Systemlyder** vises.

Følg instruksjonene på skjermen for å **deaktivere systemlyder**. Trykk deretter på **tilbake-knappen** for å gå tilbake til Nucleus Smart-appen.



- 5 Når skjermbildet **Oppsett er fullført** vises, trykker du på **Fortsett**.



- 6 Du kan bruke **Nucleus Smart-appen!** Se *brukerveiledningen for Nucleus Smart-appen* for mer informasjon.



#### MERK


For å koble sammen ytterligere compatible enheter må du først deaktivere Bluetooth på enhetene som allerede er koblet.

## Koble fra prosessoren(e)


Hvis du bytter ut lydprosessor(er), f.eks. når du får en ny lydprosessor fra reparasjonssenteret, må du gjøre følgende:

- Først må du **koble fra** de(n) gamle lydprosessor(en)(e).
- Deretter må du **koble sammen** de(n) nye lydprosessor(en)(e).


- 1 Åpne appens **Innstillinger**-skjerm bilde.

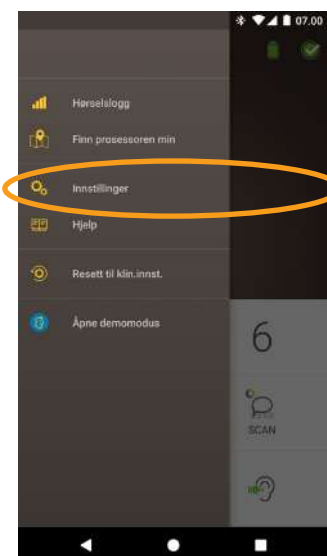


- 2 Trykk **Prosesorinnstillinger**.

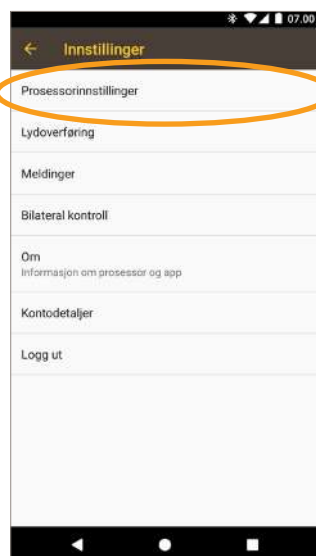

- 3 Trykk på **Koble fra prosessoren(e) din(e)**.

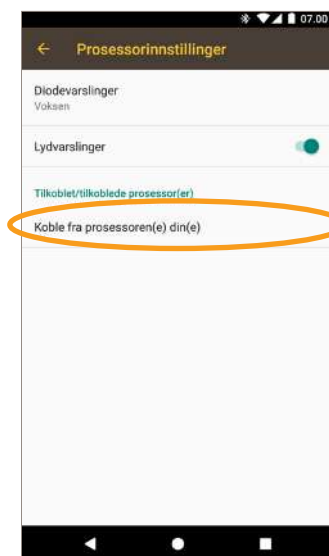


- 4 Trykk på **Ja**.

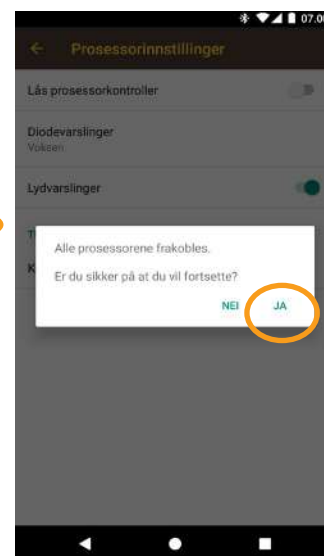


# Sjekk lydoverføringsstatus

For å sjekke din lydoverføringsstatus:


1 Åpne appens meny.

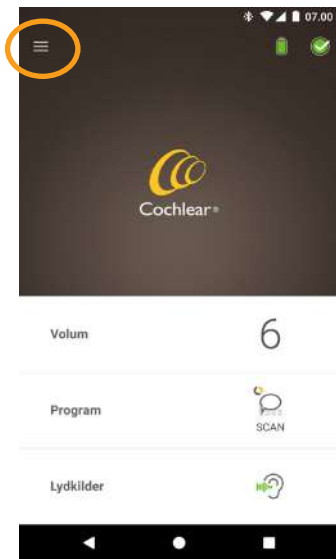

2 Trykk på Innstillinger.

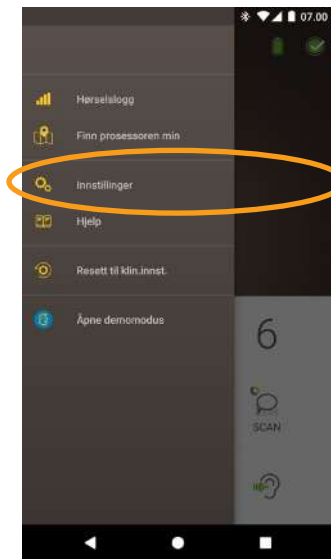

3 Trykk på Lydoverføring.

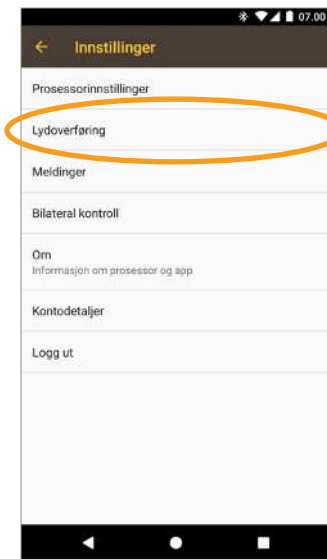

4 Hvis lydoverføringen ikke er **aktivert**, kan du se informasjonen på skjermen og trykke på de tilgjengelige koblingene.

- Se brukerveiledningen for *Kanso 2 Nucleus Smart-appen* for mer informasjon om appen.
- Se brukerveiledningen for *Kanso 2-lydprosessoren* for mer informasjon om lydprosessoren.
- Besøk oss på Internett for tips, instruksjonsvideoer og mye mer:  
[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)